

ACTOSAL[®] FLACHE AF

Yer ve Yüzey Dezenfektanı

- ✓ Kuarterner amonyum bileşenleri içerir
- ✓ Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir
- ✓ Aldehit ve fenol içermez
- ✓ Her türlü yüzeyde kullanıma uygundur
- ✓ Bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkilidir
- ✓ Konsantre üründür



ACTOSAL[®] FLACHE AF

Actosal[®] Flache AF, kimyasal içeriği ile, temizliği ve dezenfeksiyonu aynı anda yapan konsantre bir üründür. Aldehit ve fenol içermez. Tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.



Hastanelerin risk taşıyan alanlarında; kan ve vücut sekresyonu ile kontamine olan suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler, akrilik camlar, kuvözler, sürgü, ördek ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için kullanılır.

Kimyasal Bileşim:

100 g içeriği: 9,9 g Didesildimetilamonyum klorid (%70) ve yardımcı maddeler.

Kullanım Şekli:

İhtiyaç durumunda yer, yüzey ve ekipman dezenfeksiyonunda silme yöntemi ile uygulanır. Ovma-Silme-Dezenfeksiyonu (örn. iki kova metodu) veya benzeri işlemler, silme yönteminde, bez yardımı ile kullanıma uygundur. Zeminlerin dezenfeksiyon ve temizlik işlerinde paspas ve mop ile, diğer yüzeylerde silme yöntemiyle uygulanır. Her zaman temizden-kirliye, çevreden- merkeze ve yukardan-aşağıya doğru "S" şeklinde silinerek dezenfeksiyon ve temizlik işlemi tamamlanır.

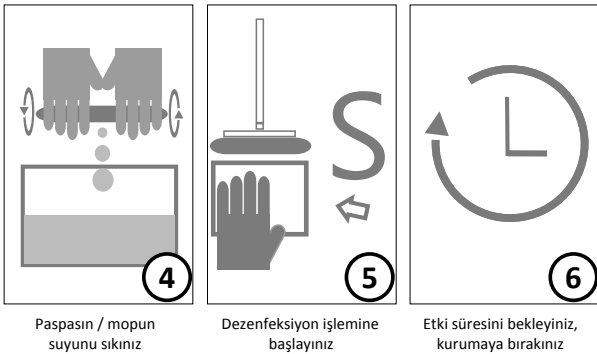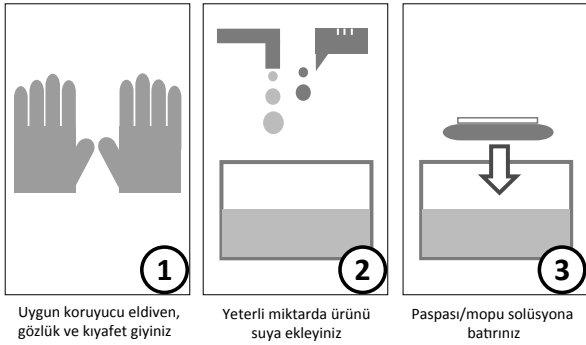

Mikrobiyolojik Aktivite	Test Metodu	Konsantrasyon	Etki Süresi
Bakterisidal	EN 1276	% 0,25	15 dakika
Fungusidal (C. albicans, A. niger)	EN 1650	% 0,25	15 dakika
Virüsidal (Adeno, Polio, MNV)	EN 14476	% 0,25	15 dakika

Kullanım Konsantrasyonu		
Konsantrasyon Oranı	Su Miktarı	Ürün Miktarı
% 0,25	997,5 mL	2,5 mL



Paketleme		
Birim	Koli İçi Adet	Artikel-No.
5 L	4	05.5502.5