




Uygun koruyucu eldiven, gözlük ve kıyafet giyiniz

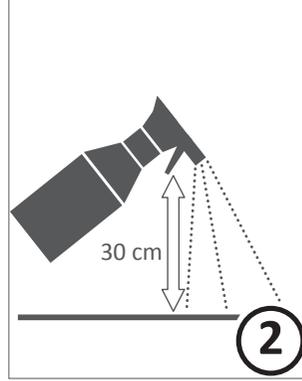

30 cm mesafeden dezenfekte edilecek yüzeylere püskürtünüz ve yüzeyin tamamen kaplanmasını sağlayınız

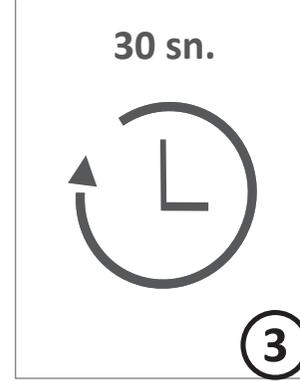

Tavsiye edilen etki süresi kadar bekleyiniz

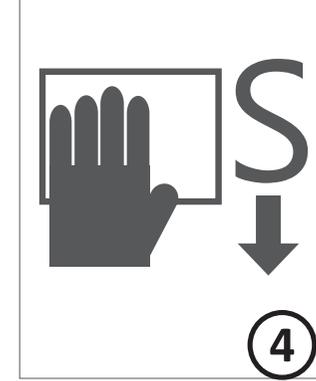

Temiz ve kuru bir bez ile her zaman temizden-kirliye, çevreden-merkeze ve yukardan-aşağıya doğru "S" şeklinde silerek dezenfeksiyon ve temizlik işlemini tamamlayınız

- Kullanıma hazırdır, alkol ve poliheksanid içerir
- Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılmıştır
- Geniş materyal uyumuna sahiptir
- Bakterisidal (Tbc dahil), fungusidal ve virüsidal etkilidir

Actosept® AF; Akrilik cam ve alkole hassas yüzeyler hariç her türlü yüzeyin hızlı dezenfeksiyonu için kullanılır. Hemşire deskleri, masa ve sandalyeler, pansuman arabaları, sıklıkla el ve cilt temasının olduğu alanlar, hasta bakım üniteleri için uygundur.

Alkole hassas yüzeylerde kullanmayınız!

Mikrobiyolojik Aktivite	Test Metodu	Konsantrasyon	Etki Süresi
Bakterisidal	EN 13727 EN 1276	Direkt kullanıma hazır solüsyon	Püskürtme sonrası 30 sn. bekleddikten sonra silme işlemi uygulayınız.
Fungusidal (C. albicans, A. niger)	EN 13624		
Türberkülosidal Mikrobakterisidal	EN 14348		
Virüsidal (Adeno, Polio, MNV)	EN 14476		

Kimyasal Bileşim:100 g içeriği: 50 g Etanol, 10 g 2-Propanol, 0,05 g Poliheksanid, yüzey aktif madde ve yardımcı maddeler.

▼
Uyarılar ve önlemler için etiket ve kullanım klavuzuna bakınız.